


Наборы для чрескожной дилатационной трахеостомии

REF 321

TRACOE experc Set twist представляет собой набор для чрескожной дилатационной трахеостомии (REF 520) с фенестрированной трахеостомической трубкой (каталожный номер REF 302-P) с манжетой и инструментом для атравматичного введения трубки.

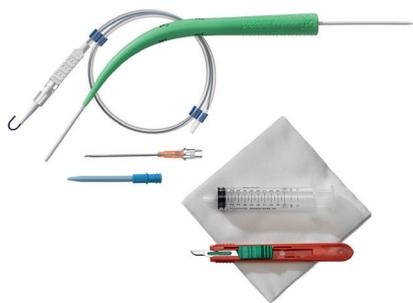


TRACOE[®]



REF 322

TRACOE experc Set twist представляет собой набор для чрескожной дилатационной трахеостомии (REF 520) с трахеостомической трубкой (каталожный номер REF 306-P) с манжетой, аспирационным каналом и инструментом для атравматичного введения трубки.

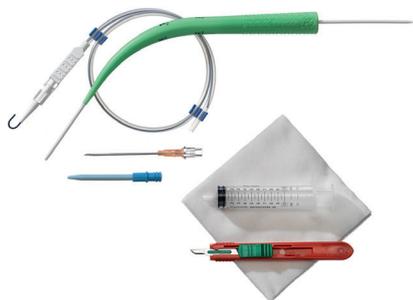

Особенности

Наконечник инструмента для атравматичного введения трубки представляет собой сворачивающийся силиконовый рукав, который за счёт точной подгонки под размер трубки сглаживает различие в диаметрах, обеспечивая её плавное вхождение и предотвращая соскальзывание. После установки трубки в трахее инструмент для атравматичного введения извлекается. Силиконовый рукав выворачивается внутрь, что облегчает процесс извлечения.

Преимущества

Дилатация выполняется по методике Ciaglia. Трубка плавно продвигается в трахею при помощи инструмента для атравматичного введения с силиконовым рукавом на конце, что минимизирует риск повреждения трахеи. Ограничитель на проксимальном конце трубки предотвращает слишком глубокое введение инструмента, что также снижает риск получения травмы. Отдельно поставляемые канюли, предустановленные в инструмент для атравматичного введения трубки, могут также использоваться для повторной установки и/или замены трубки - при необходимости в комбинации с проводником Сельдингера.

Наборы


Наборы TRACOE twist REF 301-P, REF 302-P, REF 306-P и REF 888-306-P с предустановленными канюлями, также как и набор для дилатации TRACOE experc Dilation Set REF 520, упакованы отдельно.

Наборы для чрескожной дилатационной трахеостомии

REF 520

Набор для чрескожной дилатационной трахеостомии TRACOE Experc (REF 520) можно использовать отдельно или вместе с P-образной трубкой, наиболее подходящей для пациента. Стерильно.

1. скальпель
2. шприц
3. пункционная игла (14G) с тефлоновым катетером
4. изгибоустойчивый проводник Сельдингера из Нитинола, с устройством для ввода
5. короткий дилататор (14Ch/Fr)
6. направляющий катетер с ограничителем
7. расширитель TRACOE Experc с гидрофильным покрытием
8. 4 компресса

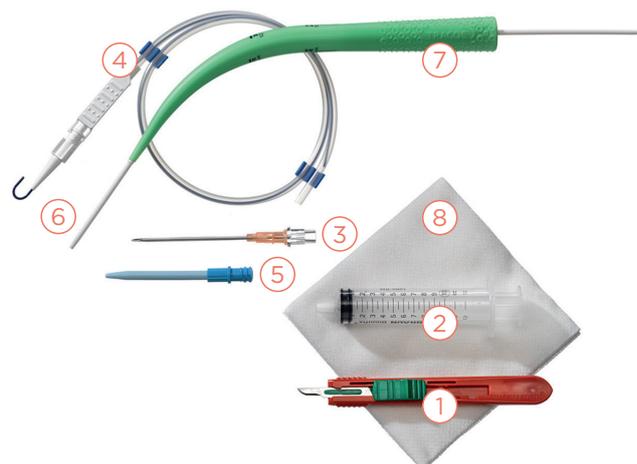

REF 302-P

Фенестрированная трахеостомическая трубка TRACOE twist с манжетой низкого давления и инструментом для атравматичного введения трубки.

В составе:

- фенестрированная внутренняя канюля с 15 мм коннектором
- 2 внутренние канюли с 15 мм коннектором
- заглушка для фенестрированной канюли
- трубка
- lubricant
- перфорированный обтюратор
- повязка для крепления на шее

Стерильно.



REF 306-P

Трахеостомическая трубка TRACOE twist с аспирационным каналом, манжетой низкого давления и инструментом для атравматичного введения трубки.

В составе:

- 2 внутренние канюли с 15мм коннектором
- 2 коннектора для устройств для аспирации
- трубка
- lubricant
- перфорированный обтюратор
- повязка для крепления на шее

Стерильно.

